

NÁVOD K OBSLUZE DOPLŇKU

SKI-set

K VÝROBKU xRover



Výhradním výrobcem a původcem je společnost:
Volter s.r.o., IČ: 29051886, E-mail: info@volter.cz.

Děkujeme Vám za zakoupení doplňku SKI-set k vozíku xRover a věříme, že Vám bude dlouho sloužit.

SKI-set s lyžemi xRover Ski je určen jako doplněk vozíků xRover, ale dá se bez problému použít na invalidní vozík nebo sportovní kočárek s velikostí kol do 20 palců.

Výrobek xRover REHA odpovídá normám:

ČSN EN 1888:2012 - jako dětský kočárek

ČSN EN 15918:2013 - jako vozík za kolo

ČSN EN 12189:2014 - jako zdravotní vozík.

Technické parametry:

- Délka lyží: 70 cm (27,5"), šířka 7,5 cm (3")
- Kolejnice: vhodné pro kola od průměru 5" do 24", a šířku kola / pneumatiky do 2,3"
- Délka lanka: cca 20 cm. Vhodné i pro vyšší ráfky.

UPOZORNĚNÍ !

Před použitím doplňku SKI-set k vozíku xRover REHA si pozorně přečtěte tento návod k obsluze:



Údržba SKI-setu je jednoduchá. Provádí se se pod tekoucí vodou za použití běžných neabrazivních čisticích prostředků. **Nikdy nepoužívat** na čištění ředidla, benzin, toluen a jiné chemikálie. Na případné promazání osiček vázání lze použít olej na kola případně jeho ekvivalent.

POZOR! Nevystavovat teplotám nad 90 st. Celsia.
Nesušit na radiátorech, přímotopech, kamnech.

Ski-set může být dodán v počtu 2/3/4 lyže s bezpečnostním popruhem na ruku a přepravní taškou.




Upevnění lyží na vozík / kočárek se provádí pomocí stavitelných distančních osiček, které se posouvají ve výřezech kolejnice, která je upevněna na lyži.

Umístění osiček na obr 1 je určeno pro 20 palcová kola, obr. 2 a obr. 3 ukazují jak lze posouvat osičky pro upevnění na menší kola.



Osička je vybavena z jedné strany bubnovým navijákem a z druhé strany maticí pro její zajištění.

POZOR! Na vnitřní straně bubnového navijáku je aretační kolík, který musí být vždy ve výřezu kolejnice! Jinak naviják nebude fungovat.

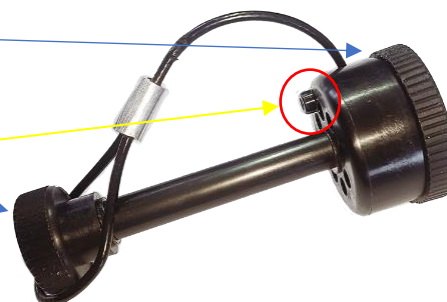

Pro upevnění kola je nutné povolit tuto matici na obou osičkách a posunout obě osičky tak, aby kolo vozíku bylo položeno na dně kolejnice a z obou stran zajištěno osičkami proti pohybu.

Po nastavení správné polohy osiček je zajistěte dotažením matic.



POZOR! Kolo umístěte vždy na střed lyže respektive kolejnice.

Po správném nastavení osiček uchopte dvěma prsty napínák lanka na bubnovém navijáku a povytažením jej odblokujte.



Držte napínák bubnového navijáku povytažený a současně s ním otáčejte doleva. Z vnitřku navijáku se vám začne odvíjet lanko s okem.



Vysuňte potřebnou délku lanka, která vám umožní protáhnout lanko skrz kolo na druhou stranu.

Proveďte stejný úkon i na druhém bubnovém navijáku.



Protáhněte lanko skrz kolo tak, aby nebylo v kolizi s ventilkem, dráty výpletu kola nebo jeho paprsky v případě, že máte plastová kola.



Na druhé straně kola zachyťte oko lanka za matici osičky. Dbejte na to, aby oko bylo celé uchyceno pod přírubou matice.




Po správném upevnění lanka na matce uchopte dvěma prsty napínák lanka na bubnovém navijáku a povytažením jej odblokujte. Otáčením doprava utáhnete lanko a přitáhnete pevně kolo k lyži. Na utažení stačí síla ve vašich prstech.




POZOR! Nikdy nepoužívejte pro utahování lanka kleště ani jiné nářadí. Jinak dojde k nevratnému poškození bubnového navijáku – a nebude uznána reklamacce.

Stejným způsobem utáhněte lanko druhého bubnového navijáku. Kolo je nyní bezpečně připevněno k lyži.

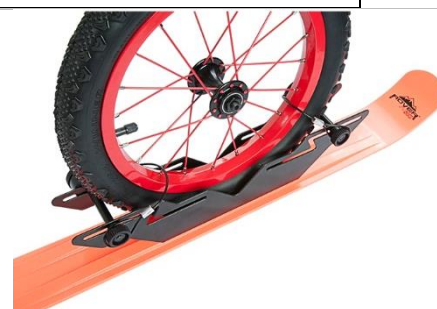

Šířka kolejnice umožňuje usadit zadní kola vozíku xRover šikmo, při zachování vodorovné polohy lyže vůči zemi. Přední 14 palcové kolo se usazuje vertikálně bez náklonu. Stejně tak se dají lyže upevnit na běžný kočárek bez šikmo usazených kol.

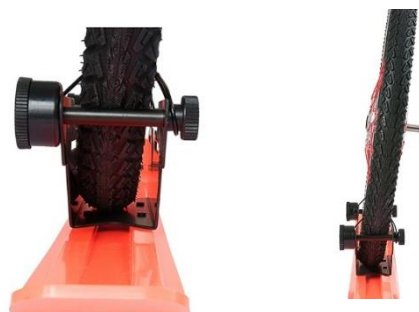

POZOR! Po nasazení lyží, vždy používejte bezpečnostní popruh, který jedním koncem připevníte na madlo vozíku a druhý si navléknete kolem zápěstí. Zabráníte tak samovolnému rozjezdu vozíku a ohrožení bezpečnosti uvnitř sedící osoby a dalších osob stojících v dráze vozíku.

Přejeme Vám spoustu skvělých zážitků s doplňkem SKI-set k xRover!